

disinfettante detergente concentrato  
specifico per strumenti  
**ad azione tubercolicida,  
battericida, fungicida, virucida**

Rev. 7 - 09/2019

## INDICAZIONI

SPORIGERM FERRI<sup>+</sup> è un disinfettante detergente concentrato specifico per la decontaminazione, deterzione e la disinfezione di strumenti per uso chirurgico e non, compresi gli strumenti rotanti sensibili agli alcali e all'alcol, impiegati presso studi medici, laboratori e cliniche. Ad ampio spettro di azione: battericida, fungicida, micobattericida e virucida (Adenovirus, HBV, HCV e HIV), SPORIGERM FERRI<sup>+</sup> svolge una rapida ed efficace azione detergente e disinfettante prima della sterilizzazione in autoclave. SPORIGERM FERRI<sup>+</sup> è ideale per l'uso in apparecchi ad ultrasuoni ed ha una grande compatibilità con i tutti i materiali, in particolare con le parti degli strumenti in gomma/silicone. Privo di aldeidi SPORIGERM FERRI<sup>+</sup> deve la sua azione ai composti di ammonio quaternario e Ortufenilfenolo. Si usa diluito anche in acque dure. Il pH elevato ne aumenta l'efficacia e la rapidità d'azione, sia come detergente che come disinfettante in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici) senza l'uso di azione meccanica.

Dispositivo Medico Classe IIb  
CE n° 0546

## ISTRUZIONI PER L'USO

SPORIGERM FERRI<sup>+</sup> è un prodotto concentrato da diluire in acqua. Preparare la soluzione in base alla tabella di applicazione utilizzando il misurino in dotazione. Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. Risciacquare abbondantemente con acqua prima dell'utilizzo. La soluzione diluita rimane stabile per una settimana, ma si consiglia di sostituirla giornalmente se gli strumenti vengono immersi frequentemente.

## TEMPI DI CONTATTO

Virus con involucro (HIV-HBV-HCV) .....	15% .....	60 min
Batteri .....	5-10% .....	15 min
Funghi .....	1-15% .....	15 min
Virus senza involucro (Adenovirus) .....	1% .....	60 min
Micobatterii .....	10% .....	60 min

## CONFEZIONAMENTO

### Sporigerm Ferri<sup>+</sup>

Codice 502001

6 flaconi da 1 lt con tappo salva bimbo e misurino dosatore

Tutti gli imballi primari sono in HDPE

secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea.


Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.

## COMPOSIZIONE 100,00 g di prodotto

Benzalconio Cloruro .....	10,0 g;
O-fenilfenolo .....	1,0 g;
coformulanti; acqua depurata q. b. a .....	100,0 g.

## CARATTERISTICHE

Liquido limpido incolore o leggermente ambrato, senza profumazione aggiunta.

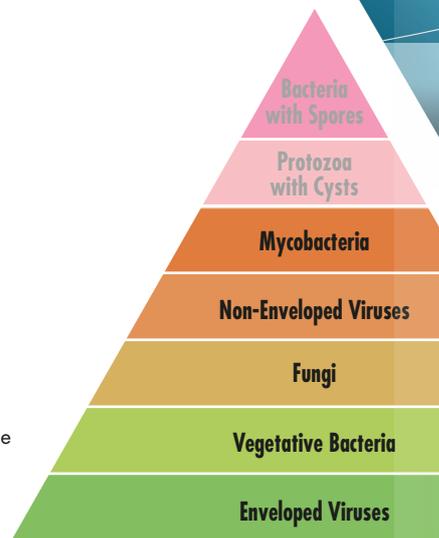

## INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Prodotto da:

GERMO S.p.A.

Via Giotto n 19/21 - 20032 Cormano M

Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

Distribuito da:

**IDS S.p.A.**

Via S. Cristoforo 28/10

17100 Savona - Italy

www.ids dental.it - info.ids dental.it

disinfettante detergente concentrato  
specifico per strumenti

**ad elevata azione tuberculocida,  
battericida, fungicida, virucida**

## ATTIVITA'

Il Benzalconio Cloruro in associazione all'O-fenilfenolo offre a SPORIGERM FERRI<sup>+</sup> un ampio spettro d'azione nei confronti dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus (Adenovirus, HIV, HCV, HBV). La tabella sottostante riporta le diluizioni e i tempi di contatto previsti.

### EN13727 - EN14561

Battericida 5-10% 15 minuti

### EN13624 - EN14562

Fungicida 1-15% 15 minuti

### EN14348

Micobattericida 10% 60 minuti

### EN14476

Virucida


Adenovirus 1% 60 minuti

HIV, HCV, HBV 15% 60 minuti

## VALIDITA' PRODOTTO

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

## AGENTI PATOGENI CLASSIFICATI IN BASE ALLA RESISTENZA AI DISINFETTANTI

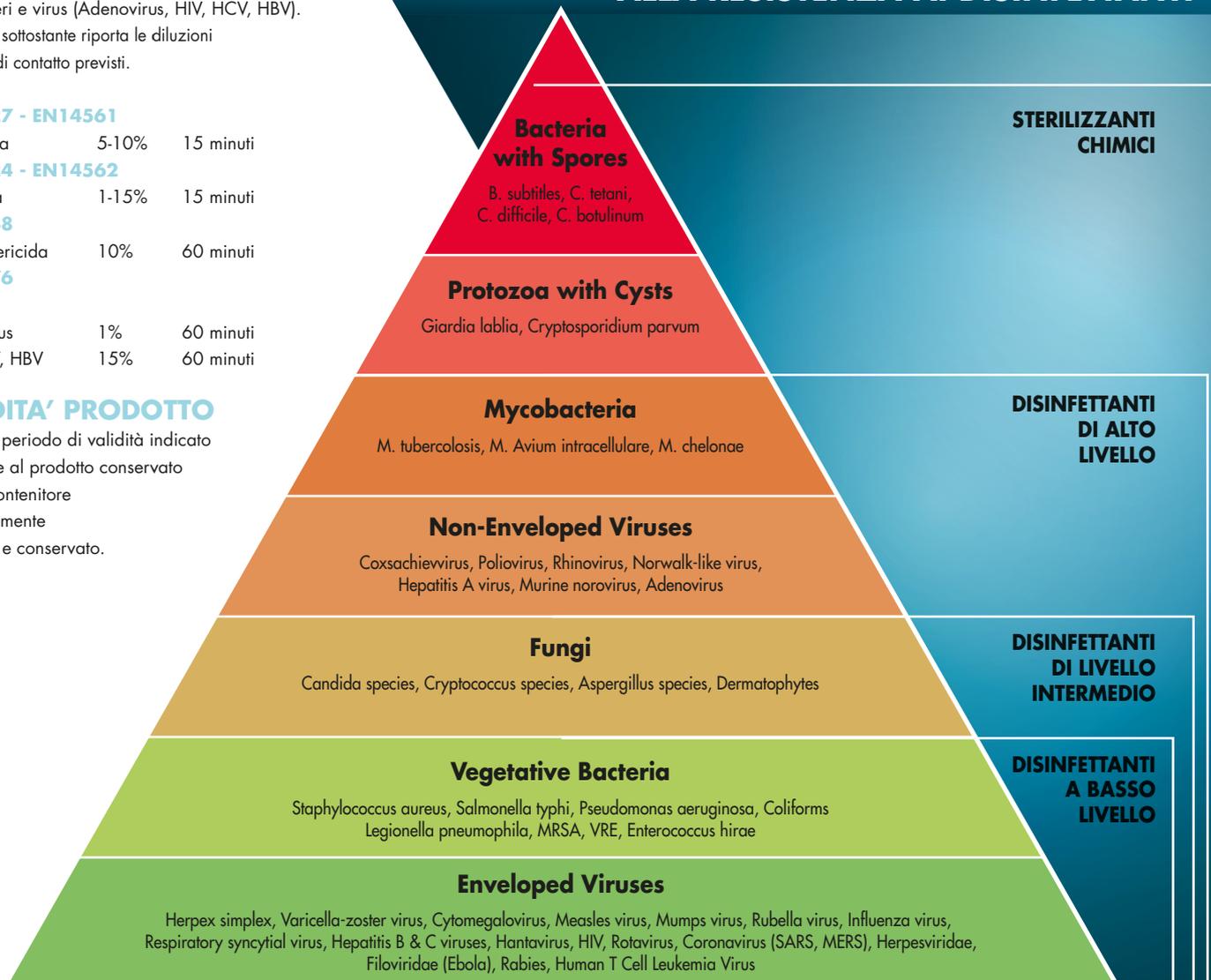

## MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione integra in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

## AVVERTENZE

In caso di uso frequente e con strumenti particolarmente contaminati o sporchi è consigliato sostituire la soluzione ogni giorno.

## CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

## AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

## INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Prodotto da:

GERMO S.p.A.

Via Giotto n 19/21 - 20032 Cormano M

Tel. 02 663 01-938

www.germo.it - info@germodis.com

Distribuito da:

**IDS S.p.A.**

Via S. Cristoforo 28/10

17100 Savona - Italy

www.ids dental.it - info.ids dental.it