

## Trattamento rapido post igiene orale

BlancOne® CLICK è uno sbiancamento rapido post igiene dentale. Questo trattamento offre, ad un costo molto contenuto ed in soli 10 minuti, un richiestissimo upgrade alla seduta d'igiene dentale.

BlancOne® CLICK è stato pensato sia per promuovere un trattamento sbiancante completo (Touch o Ultra) sia come strumento promozionale e di marketing per lo studio.

### Sistema sbiancante BlancOne®

La lampada BlancOne® ARCUS e i gel sbiancanti fotochimici BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) sono stati progettati per lavorare insieme senza interruzioni, svolgendo un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza dell'utilizzatore e il successo della procedura di sbiancamento. La lampada ARCUS è destinata esclusivamente ai gel sbiancanti fotochimici BlancOne® e non deve essere utilizzata da sola. Allo stesso modo, questi gel sono specificamente formulati per essere attivati con la lampada BlancOne® ARCUS.

I gel fotochimici BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) richiedono l'attivazione con la lampada BlancOne® ARCUS per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e ottimizzare i risultati. Le caratteristiche specifiche della lampada ARCUS, come la sua lunghezza d'onda e intensità, sono fondamentali per attivare efficacemente questi gel. Gli utilizzatori devono essere protetti con i dispositivi BlancOne® CARE per gli occhi, il viso e le labbra.

I professionisti del settore dentale devono ricevere una specifica formazione e certificazione per garantire che comprendano e si impegnino a seguire i protocolli di sicurezza con il sistema sbiancante in studio BlancOne®. Il rivenditore autorizzato ha il compito di fornire o facilitare questa formazione e certificazione, assicurando che tutti gli operatori del sistema soddisfino gli standard locali di competenza e conformità.

Nel caso dovessero verificarsi reazioni avverse significative al sistema sbiancante BlancOne®, queste devono essere segnalate al rivenditore autorizzato. Il rivenditore è quindi responsabile della documentazione completa dell'incidente e della segnalazione alle autorità sanitarie nazionali competenti e a IDS Spa. Tuttavia, effetti comuni come una lieve e temporanea sensibilità o irritazione gengivale non richiedono la segnalazione.

### ISTRUZIONI D'USO

#### A) Preparare il gel

1. Rimuovere i tappi dalle due siringhe (gel sbiancante e gel attivatore) e collegarle fra loro usando il connettore luer lock.
2. Premere gentilmente il pistone di una siringa in modo da estrarre completamente il gel nell'altra siringa.
3. Premere ora il pistone della siringa col gel travasandolo nella siringa vuota.
4. Ripetere operazione precedente fintanto che i due gel (sbiancante e attivatore) si saranno completamente amalgamati creando un gel omogeneo.
5. Sganciare dal connettore la siringa col gel e montare il puntale applicatore.

#### B) Preparare il paziente

1. Far indossare al paziente l'apribocca BlancOne® con stop per la lingua ed inserire tamponi cilindrici sopra e sotto le labbra per allontanare le labbra dalla zona del trattamento.
2. Rimuovere la pellicola salivare con uno spazzolino, se si desidera usare una miscela di acqua e pietra pomice. NON utilizzare paste lucidanti o prodotti con fluoro. Risciacquare ed asciugare.
3. Rilevare il tono di bianco iniziale del paziente usando la scala colori.

#### C) Trattamento sbiancante

1. Premendo delicatamente il pistone della siringa col gel sbiancante, applicare il gel sulla superficie di tutti i denti da sbiancare.
2. Foto attivare il gel sbiancante con luce blu.
3. Rimuovere il grosso del gel sbiancante con un rullo di cotone ed aspirare i residui di gel risciacquando con la siringa aria/acqua.

**ATTENZIONE:** Il gel attivato risulterà piuttosto denso. Qualora il beccuccio di aspirazione si ostruisca aspirare con abbondante acqua.

**NOTA:** il bordo gengivale potrebbe risultare leggermente pigmentato di rosso in alcuni punti, questo effetto è passeggero e svanirà nel giro di un'ora.

#### D) Conclusione del trattamento

1. Usando la scala colori rilevare il tono di bianco finale del paziente.
2. Rimuovere l'apribocca e fare sciacquare il paziente.

#### Foto attivazione del gel

I gel sbiancanti BlancOne® richiedono un'ideale sorgente luminosa per l'attivazione fotocinetica.

Per assicurare il pieno risultato sbiancante, raccomandiamo l'utilizzo della lampada per sbiancamento BlancOne® ARCUS che – dotata di 10 potenti led da 5W – assicura una piena attivazione del gel in modo simultaneo su ambo le arcate, inclusi gli elementi laterali, nel rispetto dei brevi tempi previsti.

La testa della lampada BlancOne® ARCUS va posta in modo perpendicolare rispetto ai denti ad una distanza di 5-10 cm dalla bocca per assicurare una buona ventilazione.

L'utilizzo di altre lampade da sbiancamento potrebbe ridurre l'efficacia del trattamento, richiede tempi più lunghi o, in certi casi, non attivare affatto il gel sbiancante.

#### TEMPI DI ATTIVAZIONE RACCOMANDATI

Dispositivo	Potenza	Tipo di attivazione	Tempo
Lampada BlancOne® ARCUS	250 mW/cm <sup>2</sup>	simultanea su ambo le arcate	10 minuti

#### AVVERTENZE PER L'UNIONE EUROPEA

- Rilascio del 5,6% di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.
- Non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.
- Da vendere esclusivamente a professionisti odontoiatri.
- Destinato esclusivamente all'utilizzo da parte di professionisti odontoiatri o sotto la loro supervisione diretta se è garantito un equivalente livello di sicurezza. Solo successivamente può essere messo a disposizione del paziente per il completamento del ciclo di trattamento.

#### PRECAUZIONI

- Prima dello sbiancamento è necessario un esame odontoiatrico.
- Lo sbiancamento non ha effetto su corone di porcellana e ricostruzioni dentali.
- Non utilizzare prodotti con tabacco; non bere caffè o vino rosso dopo il processo di sbiancamento per almeno 6 ore.
- Non indicato per donne in stato interessante. Durante l'allattamento consultare un medico.
- Non ingerire il gel. Evitare il contatto con tessuti diversi dai denti.
- Cibi/succhi acidi possono provocare sensibilità se consumati subito dopo lo sbiancamento.
- Può presentarsi irritazione al tessuto gengivale se impiegato su persone con patologia parodontale.
- Tenere i prodotti di sbiancamento dentale lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con la pelle, le mucose e gli occhi.  
In caso di contatto CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente gli occhi per parecchi minuti e consultare un medico. CON LA PELLE/ LE MUCOSE: lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione, consultare un medico.
- Se ingerito in piccole quantità, il prodotto non è dannoso, altrimenti consultare un medico.
- Alcuni pazienti possono sperimentare sensibilità o irritazione gengivale. Si tratta generalmente di effetti leggeri e transitori, ma in alcuni casi potrebbero richiedere il trattamento del dentista.